

schülke -†



gigazyme®

O gigazyme® é uma solução de limpeza triplo-enzimática desenvolvido especificamente para a limpeza manual e semi-automática de endoscópios e para a limpeza manual de instrumentos cirúrgicos

Vantagens

- Excelente poder de limpeza triplo-enzimático
- Adequado para a limpeza de ultrassons
- Odor agradável
- Sem espuma
- Não deixa resíduos

Áreas de aplicação

O gigazyme® é um agente de limpeza enzimático desenvolvido especificamente para a limpeza manual e semi-automática de endoscópios e para a limpeza manual de instrumentos cirúrgicos.

A combinação ideal de enzimas de alta qualidade (**Protease** = corte de proteínas, **Lipase** = corte de gordura, **Amilase** = corte de amido) e um sistema inovador de agentes tensoativos permite uma excelente limpeza de instrumentos termotáticos e termoláteis de qualquer tipo. O gigazyme® é também ideal para a utilização nos banhos de ultrassons.

Instruções de Utilização

gigazyme® é um concentrado que pode ser diluído em água fria na concentração pretendida. Mergulhe os instrumentos e endoscópios na solução de forma a que a superfície esteja completamente humedecida e o ar saia do lúmen. Após a limpeza, enxaguar completamente os instrumentos utilizando água esterilizada ou potável de forma a remover os resíduos da solução de limpeza. Siga as recomendações de reproprocessamento dos fabricantes de instrumentos. Não misture com agentes de limpeza e desinfetantes. Período de espera: Recomenda-se renovar a solução de trabalho todos os dias úteis e se a contaminação for claramente visível. Concentração da aplicação: com sujidade normal: 0,5 - 1%

Em caso de muita sujidade: até 10% 1 litro de uma solução a 1% corresponde a 990 ml de água e 10 ml de gigazyme®. Mais informações: Ao limpar instrumentos e endoscópios contaminados, o sangue pode coagular se a solução de limpeza estiver muito quente. Isso dificulta o processo de limpeza. De acordo com isso, a temperatura de limpeza ideal é inferior a 35 ° C. Para manter a temperatura ideal para a limpeza, a solução ficará leitosa a temperaturas acima de aprox. 32° C. O estado pode ser revertido ao adicionar água fria.



Informação do Produto

Composição:

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004:

5 - 15% de tensoactivos não iónicos, enzimas, perfumes.

Outros ingredientes: solubilizantes, inibidores de corrosão, corantes.

Informação Físico-Química

Cor	Azul
Densidade	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Flash point	43 °C / Método: DIN 51755 Part 1
Forma	líquido
pH	ca. 7 / 20 °C / concentrado

Informação Adicional

Leia sempre o rótulo e informações do produto antes de usar.

Mantenha o recipiente bem fechado. Proteja contra geadas, calor e luz solar. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Embalagens

Item	Embalagens	Item nº
gigazyme -int- 2 l FL	5/ Caixa	
gigazyme D/E 5 l KA	1/ Caixa	

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações entre em contato com nossa subsidiária ou distribuidora local.

Acessórios

Acessórios	Item nº
Chave para 5l + 10l	135810
doseador para embalagens 2l	183401
copo medidor 500 ml	136101
copo medidor 50 ml	136102
Alimentador de doseamento schülke 5 l / 10 l (20ml / stroke)	117101
Torneira schülke para 5 l / 10 l	135501

Produtos relacionados

- gigasept® PAA concentrate
- gigasept® pearls
- gigazyme® X-tra

Informação Ambiental

A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa, desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do ambiente, com avançados processos de produção, a preços competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões profissionais e mais informações

Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura e relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Para mais informações:

Schülke-Portugal

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85

www.schuelke.pt



Schülke & Mayr GmbH possui autorização do fabricante de acordo com a secção 13 paragrafo 1 Lei alemã sobre drogas e certificados de conformidade GMP para medicamentos.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com