

schülke →



gigazyme® X-tra

Detergente multienzimático de elevado desempenho e efeito desinfetante para a limpeza de endoscópios e instrumentos cirúrgicos

Vantagens

- excelente poder de limpeza
- eficácia microbiológica para proteção dos profissionais e ambiente envolvente
- bactericida, levedurocida e vírus envelopados
- adequado para uso em banhos de ultrassom
- excelente compatibilidade com materiais

Áreas de aplicação

A combinação ideal de enzimas de elevada qualidade (**Protease** = corte de proteínas, **Lipase** = corte de gordura, **Amilase** = corte de amido) e um sistema inovador de surfactantes que permite um excelente efeito de limpeza de qualquer tipo de instrumentos termooestáveis e termolábeis. As propriedades de gigazyme® X-tra oferece uma proteção contra contaminações por patógenos infecciosos tais como bactérias, fungos e vírus envelopados (incl. HIV, HBV, HCV) nos profissionais e ambiente.

Instruções de Utilização

gigazyme® X-tra é concentrado e deve ser diluído com água fria para produzir a concentração desejável para a aplicação em questão.

Dosagem:

depende do grau de eficácia 0,5%-2%.

Exemplo de Aplicação:

1 litro de solução de trabalho de 2% corresponde a 980 ml de água e 20 ml de gigazyme® X-tra. Colocar os endoscópios e instrumentos para reprocessamento na solução de gigazyme® X-tra imediatamente após o uso. Assegurar uma completa cobertura das superfícies, também para instrumentos ociosos, e deixar fazer efeito. Enxaguar bem os instrumentos após, utilizando água potável, ou preferencialmente água destilada estéril ou água totalmente dionisada, para remover completamente os resíduos da solução de limpeza. Seguir as recomendações de reprocessamento dos fabricantes dos instrumentos. Renovar a solução de ação todos os dias de trabalho ou se existir contaminação visível.

Não misturar gigazyme® X-tra com outros desinfetantes.

Não adequado para desinfecção final de dispositivos médicos semicríticos ou críticos!

As concentrações no quadro abaixo também se aplicam a banhos de ultrassom.

Eficácia Microbiológica

Eficácia	Concentração	Tempo de contacto
bactericida EN13727, EN14561 - condições sujas	1 % (10 ml/l)	30 min.
bactericida EN13727, EN14561 - condições sujas	2 % (20 ml/l)	15 min.
levedurocida EN13624, EN14562 - condições sujas	1 % (10 ml/l)	30 min.
levedurocida EN13624, EN14562 - condições sujas	2 % (20 ml/l)	15 min.
vírus envelopados (incl. HIV, HBV, HCV) de acordo com DVV (German Registered Association for Combating Viral Diseases)//RKI Guidelines - condições sujas	1 % (10 ml/l)	30 min.
vírus envelopados (incl. HIV, HBV, HCV) de acordo com DVV (German Registered Association for Combating Viral Diseases)//RKI Guidelines - condições sujas	2 % (20 ml/l)	15 min.

CE 0297

Informação de Produto

Composição:

100 g de gigazyme® X-tra contém os seguintes ingredientes ativos: 7.7 g de cloreto de didecildimetilamónio, 0.4 g de biguanina de polihexametileno.

Contém subtilisina, biguanina de polihexametileno. Pode produzir uma reação alérgica.

Rotulagem de acordo com a Regulamentação (CE) N.º 648/2004:

5-15% surfactantes não iónicos, enzimas, perfumes.

Informação Química-Física

Cor	verde
Densidade	ca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C
Flash point	ca. 52 °C / Método : DIN 53213, Parte 1
Forma	líquido
pH	ca. 7,5 / 20 °C / concentrado
Viscosidade, dinâmico	ca. 53 mPa*s

Recomendações de Segurança

Géis médicos lubrificantes (com ou sem efeito anestésico local) são frequentemente utilizados durante exames com endoscópios. Quando a solução de gigazyme®X-tra entra em contacto com esses géis, existe a possibilidade de precipitações. Esta reação pode ocorrer com qualquer agente desinfetante catiónico. Por isso, qualquer mistura destes produtos deve ser evitada, e os resíduos do gel devem ser bem lavados.

Embalagens

Embalagens	Embalagens	Item n.º.
gigazyme X-tra 2 l FL	5/Caixa	sob pedido
gigazyme X-tra 5 l KA	1/Caixa	sob pedido

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informação por favor contacte a sua subsidiária ou distribuidor local.

Acessórios

Acessórios	Item n.º.
5 l/10 l-Canister key	135810
measuring cup 500 ml	136101
measuring cup 50 ml	136102
schülke dosing feeder 5 l / 10 l (20ml / stroke)	117101
schülke tap for 5 l / 10 l can	135501

Produtos Relacionados

- bath-system 10 l
- bath-system 30 l
- bath-system 3 l
- bath-system 5 l
- gigasept® PAA concentrate

Informação Ambiental

A Schülke investiga e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do ambiente, económicos, com avançados processos de produção, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões Profissionais e mais informações

Para uma visão geral de toda a literatura relativa a este produto, por favor, visite o nosso site: www.schuelke.pt

Se tiver mais questões:

Schülke & Mayr GmbH

Uma companhia do  Grupo Air Liquide

Informações: Schülke → Portugal
geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85 | www.schuelke.pt



Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN EN ISO 13485 (Reg.-N.º 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).